



Peristeen Plus: un rimedio per la tua gestione intestinale



Peristeen® Plus



Stipsi, incontinenza fecale, costipazione cronica e procedure di svuotamento intestinale che richiedono molto tempo possono rappresentare sfide e fonte di insicurezza nella tua quotidianità.

Una gestione intestinale regolare può aiutarti a migliorare la tua qualità di vita, **lasciandoti tempo da dedicare ad altre attività.**

Convivere con queste sfide non è obbligatorio, l'irrigazione transanale (TAI) è un rimedio che può aiutarti a ritrovare serenità e sicurezza, grazie ad una adeguata gestione intestinale.

Peristeen Plus è la risposta di Coloplast per attuare l'irrigazione transanale.

Questa tecnica ha lo scopo di **prevenire** l'incontinenza fecale, la stipsi e la costipazione cronica inserendo acqua nell'intestino attraverso il retto, **favorendo** uno svuotamento intestinale regolare e pianificabile.

Peristeen Plus è stato ideato per essere **facile da utilizzare**, anche dalle persone che presentano una limitata manualità, ottimizzando il proprio tempo a disposizione.

Dopo lo svuotamento con **Peristeen Plus** l'intestino rimarrà pulito fino all'irrigazione successiva, ridando il controllo e riducendo il rischio di incidenti.

La prevenzione di stipsi e incontinenza è data da uno svuotamento intestinale più efficace


L'irrigazione del colon con Peristeen Plus svuota l'intestino e le nuove feci non raggiungono il retto prima della successiva evacuazione.

Questo permette di sentirsi tranquilli e vivere la vita più serenamente, grazie alla possibilità di programmare quando e dove evacuare.



Come agisce Peristeen® Plus

Peristeen Plus agevola la fuoriuscita delle feci dall'intestino, introducendo acqua nel colon grazie ad un catetere rettale inserito nell'ano. Successivamente l'acqua introdotta viene evacuata nel wc assieme alle feci presenti nel colon discendente, nel sigma e nel retto. In caso di incontinenza fecale, di costipazione cronica o di entrambe, Peristeen Plus può aiutare a ripristinare la regolare funzione intestinale, migliorando la sicurezza e la qualità di vita di chi lo usa.

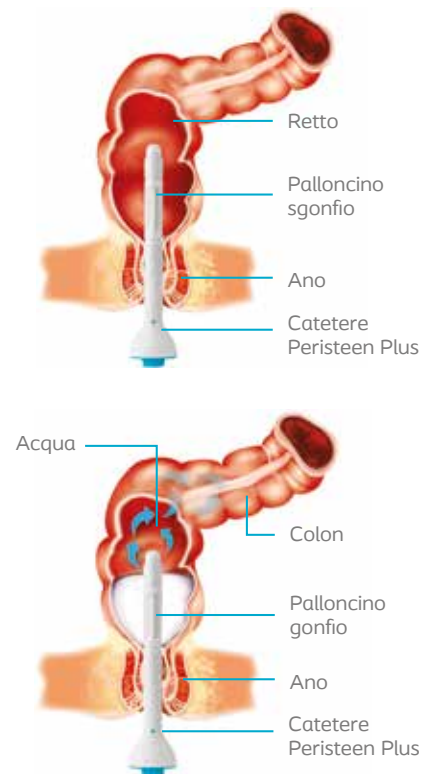

Cosa puoi aspettarti da Peristeen Plus



Possibilità di programmare la propria gestione intestinale



Libertà di decidere dove e quando poter svuotare l'intestino



Svuotamento dell'intestino per un periodo fino a 2 giorni



Miglioramento della qualità di vita

Coloplast: una storia di innovazione

Da oltre 60 anni sviluppiamo prodotti e soluzioni con l'intento di rendere più facile la vita delle persone con bisogni di cura intimi e personali.

15 anni fa abbiamo introdotto Peristeen, il dispositivo di Coloplast per praticare l'irrigazione transanale.

Lo sviluppo di Peristeen Plus si basa sull'eredità acquisita da Peristeen, con l'apporto di nuove caratteristiche volte a facilitarne l'utilizzo.



Autorizzazione Ministeriale 0039790-01/06/2021-DGDMF-MDS-P. È un dispositivo CE. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Questo materiale è di proprietà esclusiva di Coloplast ed è strettamente confidenziale. La riproduzione o la divulgazione di materiale e / o informazioni contenute nel presente documento è vietata senza il previo consenso scritto di Coloplast



Coloplast Care: il servizio di supporto all'utilizzo di Peristeen Plus

Coloplast Care è il nostro servizio gratuito di assistenza tecnica personalizzato, disponibile a fornirti tutte le indicazioni utili per la prova e il reperimento del prodotto. Il servizio risponde dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 al numero verde di assistenza tecnica **800.064.064**.



Coloplast®
Care | Il tuo servizio
giorno dopo
giorno

Coloplast Care è anche online.
Seguici su: visita.coloplast.it/bowelcare



Autorizzazione Ministeriale
0039790-01/06/2021-DGD-
MF-MDS-P. È un dispositivo CE.
Leggere attentamente
le istruzioni per l'uso.